

Schnellstart beim HAMILTON-EM7


Leitlinien zum Starten des HAMILTON-EM7

Tägliche Checkliste


- Das Beatmungsgerät auf sichtbare Schäden prüfen
- Das Beatmungsschlauchset auf sichtbare Schäden prüfen
- Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft aller Zubehöerteile und Verbrauchsmaterialien überprüfen
- Batterieladestatus überprüfen und sicherstellen, dass die Batterie vollständig geladen ist

Anschliessen des Beatmungsschlauchsets


1. Schliessen Sie das Expirationsventil an den Anschluss zum Patienten an.

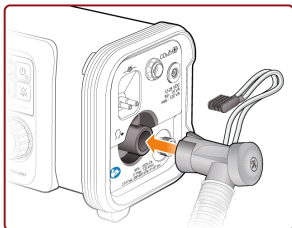


2. Schliessen Sie den Flow-Sensor-Druckstecker an den Anschluss für den Flow-Sensor-Druckstecker an. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche *nicht* geknickt sind.

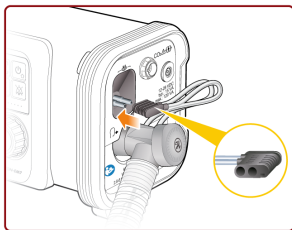

3. Schliessen Sie bei Bedarf den CO2-Sensor an (CO2-Option erforderlich).

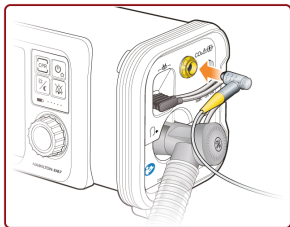

Alle Komponenten sind angeschlossen

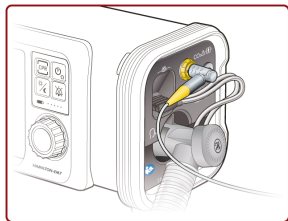


**HAMILTON
MEDICAL**

Anschliessen der Sauerstoffzufuhr


Stellen Sie sicher, dass eine Sauerstoffquelle angeschlossen ist.

Angaben von Patienteninformationen

1. Schalten Sie das Beatmungsgerät ein.
2. Berühren Sie den gewünschten Patiententyp.

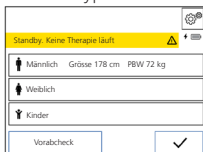

3. Passen Sie ggf. die Grösse des Patienten an. Das PBW wird automatisch berechnet.

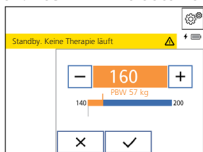

4. Berühren Sie ✓.

Kalibrieren des CO2-Sensors

Nehmen Sie die Kalibration vor, während der CO2-Sensor und der Atemwegsadapter miteinander verbunden, aber *vom Beatmungsschlauchsystem getrennt* sind.


1. Schliessen Sie den CO2-Sensor am CO2-Anschluss des Beatmungsgerätes an.
2. Warten Sie, bis sich der Sensor erwärmt hat (2 Min.).
3. Schliessen Sie den Atemwegsadapter am CO2-Sensor an.
4. Berühren Sie > Allgemein.
5. Stellen Sie sicher, dass der CO2-Sensor auf EIN gesetzt ist.
6. Berühren Sie CO2-Sensor-Kalibration.

Die Kalibration des Sensors wird gestartet.


Mit einer Meldung am Ende wird angezeigt, ob sie erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.

Durchführen der Überprüfung vor Inbetriebnahme


1. Berühren Sie im Fenster Patienteneinstellungen die Schaltfläche **Vorabcheck**.
2. Berühren Sie ✓, um die Überprüfung zu starten.

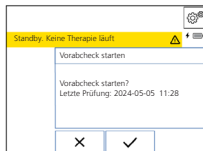

Anleitungen führen Sie durch die Überprüfung.

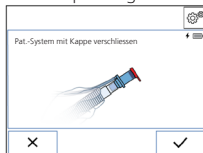

3. Entfernen Sie die Kappe bei entsprechender Aufforderung.

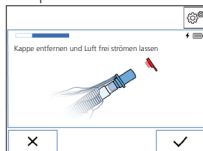

4. Berühren Sie nach Abschluss des Vorgangs ✓ zum Beenden.

