

HAMILTON-EM7 快速入门



HAMILTON-EM7 启动指南

日常检查清单

- 检查呼吸机有无明显损坏
- 检查呼吸装置有无明显损坏
- 检查所有配件和耗材是否齐备并可直接使用
- 检查电池充电状态，并确保电池已充满电



连接呼吸装置

1. 将呼气阀连接到至病人端口。
2. 将流量传感器压力插头连接到流量传感器压力插头连接端口。确保管路未发生扭结。

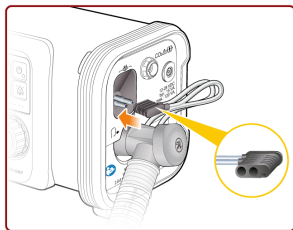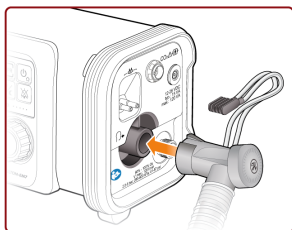

3. 如果需要，连接 CO2 传感器（需要二氧化碳选项）。

全部已连接

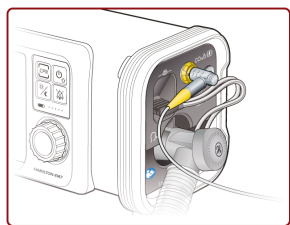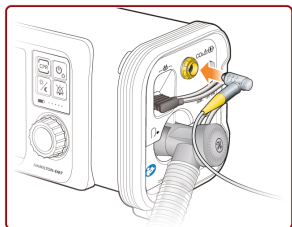


连接氧气

确保氧气源已连接。

指定病人信息

1. 开启呼吸机。
2. 触摸所需病人类型。

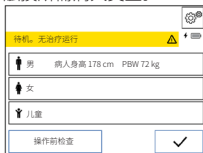

3. 如果需要，更改病人身高。PBW 自动计算得出。



4. 触摸 ✓。

校准 CO2 传感器

在 CO2 传感器和气道接口相互连接，但与呼吸管路断开的情况下进行校准。


1. 将 CO2 传感器连接到呼吸机上的 CO2 端口。
2. 等待传感器预热完毕（2 分钟）。
3. 将气道接口连接到 CO2 传感器。
4. 触摸 > 通用。
5. 确保 CO2 传感器已设置为开。
6. 触摸 CO2 传感器校准。

传感器校准开始。

最后会显示一条消息，指示操作成功或失败。

进行操作前检查

1. 触摸病人设置窗口中的操作前检查。
2. 触摸 ✓ 开始检查。

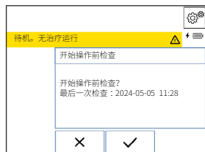

系统将引导您完成检查。



3. 根据提示，取下盖子。



4. 完成后，触摸 ✓ 退出。

