

HAMILTON-EM7: краткое руководство



Инструкция по запуску аппарата ИВЛ HAMILTON-EM7

Ежедневный контрольный список дел


- Осмотрите аппарат ИВЛ на наличие видимых повреждений
- Осмотрите комплект дыхательного контура на наличие видимых повреждений
- Убедитесь, что все принадлежности и расходные материалы имеются в наличии и готовы к использованию
- Проверьте состояние заряда аккумулятора и убедитесь, что он полностью заряжен

Подключение комплекта дыхательного контура


1. Подсоедините клапан выхода к порту *К пациенту*.
2. Подключите герметичную заглушку для датчика потока к порту ее соединения. Убедитесь, что трубка не пережата.

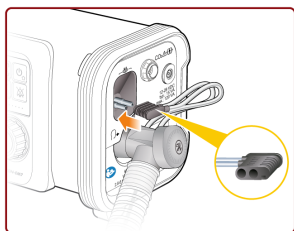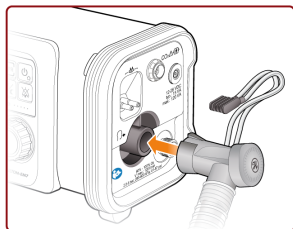

3. При необходимости подсоедините датчик CO2 (если выбрана опция CO2).

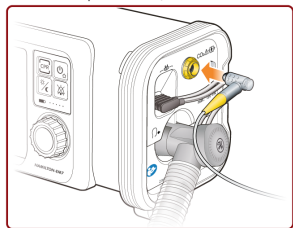

Все компоненты подключены

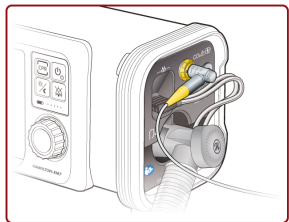


HAMILTON
MEDICAL

Подключение кислорода


Убедитесь, что источник подачи кислорода подключен.

Указание данных пациента

1. Включите аппарат ИВЛ.
2. Коснитесь необходимого типа пациента.

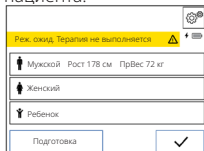

3. При необходимости измените рост пациента. Аппарат ИВЛ автоматически рассчитывает прогнозируемый вес тела (ПрВес).

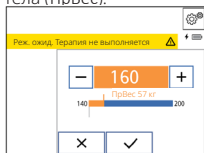

4. Коснитесь значка ✓.

Калибровка датчика CO2


Выполните калибровку, когда датчик CO2 и адаптер воздуховода соединены друг с другом и отключены от дыхательного контура.

1. Подключите датчик CO2 к порту CO2 на аппарате ИВЛ.
2. Дождитесь, пока датчик прогреется (2 мин).
3. Подсоедините адаптер воздуховода к датчику CO2.
4. Нажмите значок ⚙️ > Общее.
5. Убедитесь, что для датчика CO2 выбрана опция ВКЛ.
6. Коснитесь опции Калибровка датчика CO2.


Будет запущена калибровка датчика. После завершения отобразится сообщение, свидетельствующее об успехе или неудаче.

Выполнение подготовки


1. Коснитесь опции Подготовка в окне Настройки пациента.
2. Коснитесь значка ✓, чтобы начать подготовку.

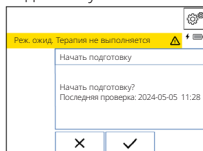

Затем следуйте указаниям.

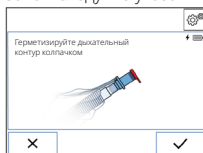

3. Когда на экране появится соответствующий запрос, снимите крышку.

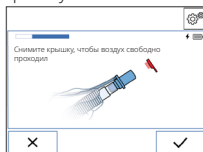

4. После завершения коснитесь значка ✓, чтобы выйти.

