

Inicio rápido del HAMILTON-EM7


Directrices para poner en marcha el HAMILTON-EM7

Lista de comprobaciones diarias


- Comprobar si hay daños visibles en el respirador
- Comprobar si hay daños visibles en el equipo respiratorio
- Comprobar que el material fungible y los accesorios están disponibles y listos para su uso
- Comprobar el estado de carga de la batería y asegurarse de que está completamente cargada

Conexión del equipo respiratorio


1. Conecte la válvula espiratoria al puerto *hacia el paciente*.

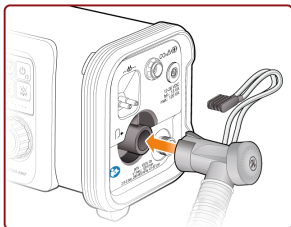


2. Conecte el tapón de presión del sensor de flujo al puerto de conexión para el tapón de presión del sensor de flujo. Asegúrese de que el tubo *no* está doblado.

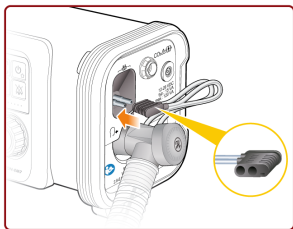

3. Conecte el sensor de CO2, si es necesario (opción CO2 necesaria).

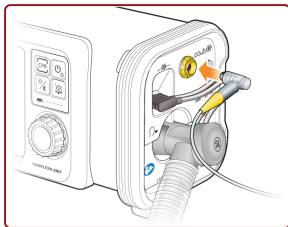

Todo está conectado

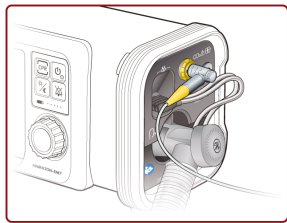


HAMILTON
MEDICAL

Conexión del oxígeno

Asegúrese de que hay una fuente de oxígeno conectada.


Especificación de la información del paciente

1. Encienda el respirador.
2. Seleccione el tipo de paciente apropiado.

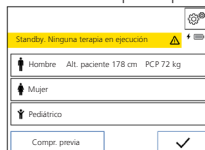

3. Si es necesario, cambie la altura del paciente.

El PCP se calcula automáticamente.

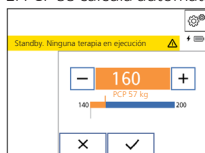

4. Toque ✓.

Calibración del sensor de CO2

Calibre el sensor de CO2 y el adaptador de vía aérea estando conectados entre sí y *desconectados del circuito respiratorio*.


1. Conecte el sensor de CO2 al puerto de CO2 del respirador.
2. Espere a que el sensor se caliente (2 minutos).
3. Conecte el adaptador de vía aérea al sensor de CO2.
4. Toque  > General.
5. Asegúrese de que el sensor de CO2 está configurado en Enc.
6. Toque Calibración del sensor de CO2.

A continuación, se iniciará la calibración del sensor.

Una vez finalizada, se mostrará un mensaje para indicar si la calibración se ha realizado correctamente o ha fallado.

Realización de la comprobación previa a la puesta en funcionamiento


1. Toque **Compr. previa** en la ventana de Ajustes del paciente.
2. Toque ✓ para comenzar las comprobaciones.

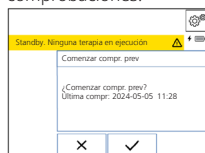

El sistema le guiará por las comprobaciones.



3. Cuando se le pida, retire la tapa.

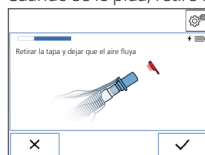

4. Una vez que haya finalizado, toque ✓ para salir.

