

Avvio rapido di HAMILTON-EM7



Indicazioni per l'avvio di HAMILTON-EM7

Elenco dei controlli quotidiani


- Controllare se ci sono danni visibili sul ventilatore
- Controllare se ci sono danni visibili sul circuito paziente
- Controllare di avere a disposizione tutti gli accessori e i prodotti di consumo pronti per l'uso
- Controllare lo stato di carica della batteria e assicurarsi che sia completamente carica.

Connessione del set circuito paziente


1. Collegare la valvola espiratoria alla porta *Al paziente.*
2. Collegare il connettore a pressione del sensore di flusso alla porta apposita presente sul ventilatore. Verificare che il tubo *non* sia piegato o schiacciato.

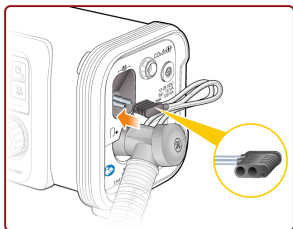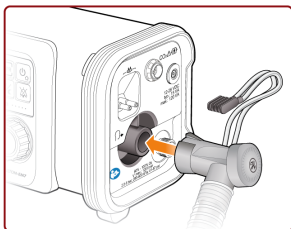

3. Collegare il sensore di CO₂, se necessario (opzione CO₂ necessaria).

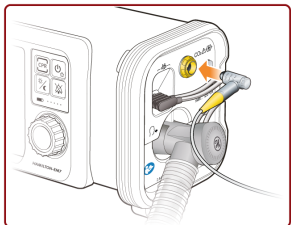

Tutti i componenti collegati

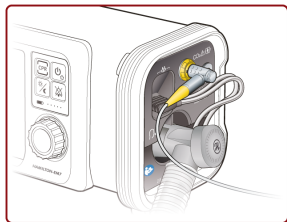


HAMILTON
MEDICAL

Collegamento dell'ossigeno

Verificare che vi sia una fonte di ossigeno collegata.

Inserimento dei dati del paziente

1. Accendere il ventilatore.
2. Toccare il tipo di paziente desiderato.

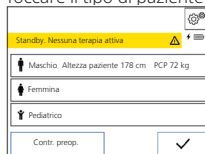

3. Se necessario, modificare l'altezza del paziente.
Il PCP viene calcolato automaticamente.



4. Toccare ✓.

Calibrazione del sensore di CO2


Eseguire la calibrazione con l'adattatore per vie aeree e il sensore di CO2 collegati l'uno all'altro, ma *scollegati dal circuito paziente*.

1. Collegare il sensore di CO2 alla porta CO2 sul ventilatore.
2. Attendere che il sensore si riscaldi (2 min).
3. Collegare l'adattatore per vie aeree al sensore di CO2.
4. Toccare > Generale.
5. Verificare che Sensore CO2 sia impostato su ON.
6. Toccare Calibrazione sensore CO2.


Viene avviata la calibrazione del sensore. Al termine dell'operazione, un messaggio ne indica l'esito positivo o negativo.

Esecuzione della verifica preoperatoria

1. Toccare **Contr. preop.** nella finestra Impostazioni paziente.
2. Toccare ✓ per iniziare i controlli.

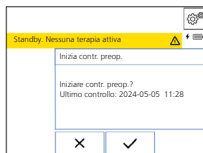

Il sistema guida l'utente nell'esecuzione dei controlli necessari.

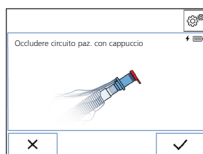

3. Quando richiesto, rimuovere il cappuccio.



4. Al termine della verifica, toccare ✓ per uscire.

