


Referencia rápida del HAMILTON-HF90

Cambio de la batería

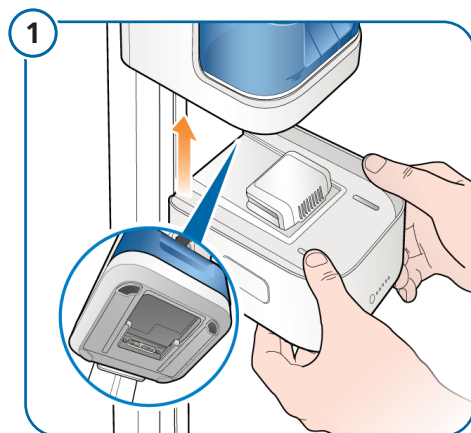


PRECAUCIÓN


La batería es pesada. Manipúlela con cuidado.

Inserte la batería debajo del dispositivo, un poco adelantada.

Ajuste el conector eléctrico de la batería en el hueco que hay debajo del dispositivo.

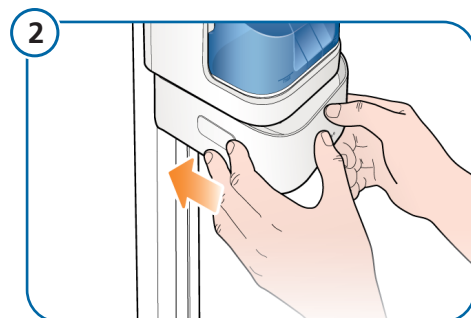


Vuelva a deslizarse la batería hasta que encaje en su sitio con un clic.

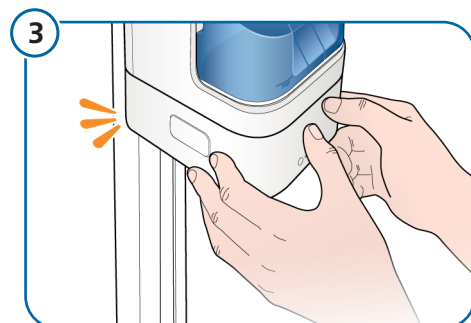


Cuando la batería se ha encajado en su sitio, puede escucharse un clic.

Retirada de la batería

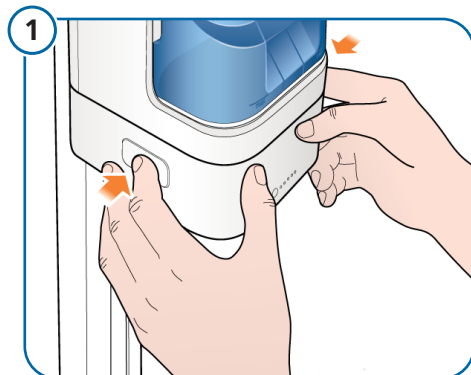


Pulse los botones que hay a ambos lados de la batería para desbloquearla y comience a deslizarla hacia delante.

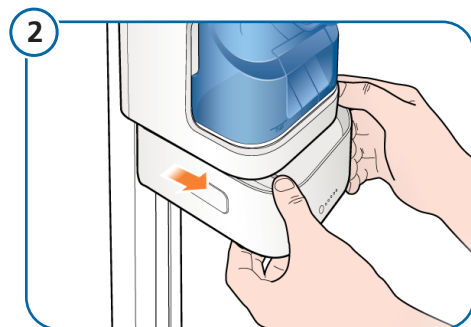

Deslice con cuidado la batería hacia delante.

El compartimento eléctrico de la batería impedirá que se deslice completamente fuera del dispositivo.

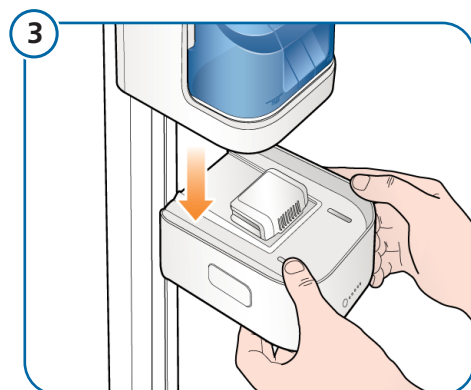

PRECAUCIÓN

La batería es pesada. Manipúlela con cuidado.

Cuando esté en la posición adecuada, tire de la batería hacia abajo para sacarla de debajo del dispositivo.