

Pulizia e disinfezione HAMILTON-HF90

Scheda di riferimento rapido

Prima di procedere

Esaminare le informazioni sulla sicurezza e verificare quanto segue:

- Utilizzare il metodo e i materiali appropriati durante la pulizia e la disinfezione del dispositivo e dei suoi componenti, poiché così facendo si evita di danneggiare l'apparecchiatura e si limitano le contaminazioni crociate.
- Assicurarci che il dispositivo sia spento prima di iniziare la procedura.


Preparazione di HAMILTON-HF90 per la pulizia e la disinfezione

1. Scollegare il circuito paziente.




Afferrare i lati del connettore per la branca mentre lo si estrae dal dispositivo.

2. Rimuovere la camera di umidificazione.

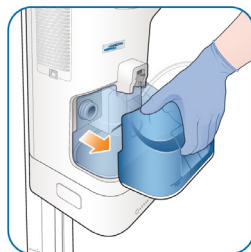


Estrarre la camera direttamente dal dispositivo.

3. Coprire l'adattatore di uscita del gas.

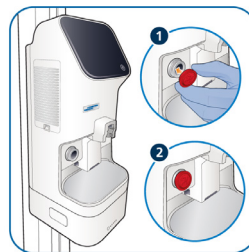

Coprire l'adattatore di uscita del gas con il cappuccio protettivo.

4. Scollegare l'alimentazione idrica.

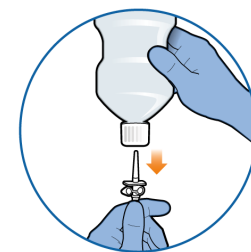

Estrarre il perforatore di alimentazione dell'acqua dal serbatoio dell'acqua.

Procedure e agenti di pulizia e disinfezione

La tabella seguente elenca i componenti applicabili del dispositivo e come e quando pulirli. I detergenti e disinfettanti approvati sono elencati nella tabella a destra e sono pronti per l'uso.

Metodi di pulizia e disinfezione di HAMILTON-HF90

Componente	Frequenza	Metodo di pulizia/ disinfezione	Agenti di pulizia e note
Display touchscreen	Dopo ogni utilizzo sul paziente o all'occorrenza durante la terapia.	Strofinare con un panno inumidito con una soluzione di pulizia/disinfezione approvata e registrata.	<ul style="list-style-type: none">• Non usare soluzioni a base di aceto• Evitare l'uso di panni ruvidi
Parte esterna del dispositivo, comprendente: <ul style="list-style-type: none">• Involucro, comprese le coperture dei filtri• Cavi di alimentazione• Sistemi di montaggio• Piastra riscaldante	Dopo ogni utilizzo sul paziente o all'occorrenza durante la terapia.	Strofinare con un panno inumidito con una soluzione di pulizia/disinfezione approvata e registrata.	Non pulire l'interno del dispositivo per non danneggiare i componenti interni. In caso di pulizia durante la terapia, non pulire la camera di umidificazione o il circuito paziente. Quando si sostituisce un filtro, assicurarsi di pulire la copertura del filtro. Lasciare asciugare completamente la copertura prima di riposizionarla.
Accessori per l'uso su carrello, tra i quali: <ul style="list-style-type: none">• Carrello• Sistema di supporto porta-bombole di ossigeno	Dopo ogni utilizzo sul paziente o all'occorrenza durante la terapia.	Strofinare con un panno inumidito con una soluzione di pulizia/disinfezione approvata e registrata.	

Agenti di pulizia e disinfezione di HAMILTON-HF90

Agente di pulizia/disinfezione	Concentrazione
Agenti di pulizia/disinfezione approvati dall'EPA	
CaviWipes (Metrex)	Pronto all'uso
Agenti di pulizia/disinfezione approvati	
CaviWipes (Metrex)	Pronto all'uso
mikrozid universal wipes (Schülke)	Pronto all'uso
Environmental Cross® V-Lock (Hakuzo Medical)	Pronto all'uso
Incidin OxyWipes S (Ecolab)	Pronto all'uso
Sani-Cloth active (Ecolab)	Pronto all'uso