

Démarrage rapide du HAMILTON-EM7


Consignes de démarrage du HAMILTON-EM7

Liste de contrôle quotidienne


- Vérifiez que le ventilateur ne présente aucun dommage visible
- Vérifiez que le kit de circuit respiratoire ne présente aucun dommage visible
- Vérifiez que tous les accessoires et consommables sont disponibles et prêts à l'emploi
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie et assurez-vous qu'elle est complètement chargée

Raccordement du kit de circuit respiratoire


1. Connectez la valve expiratoire au port
Vers patient.

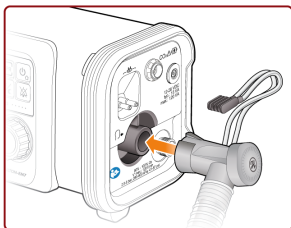


2. Raccordez le connecteur de pression du capteur de débit au port de connexion dédié. Vérifiez que la tubulure n'est *pas* entortillée.

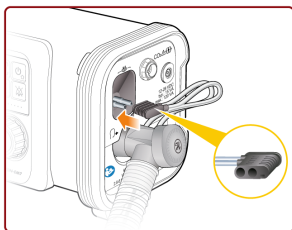

3. Connectez un capteur de CO₂, si nécessaire (option CO₂ obligatoire).

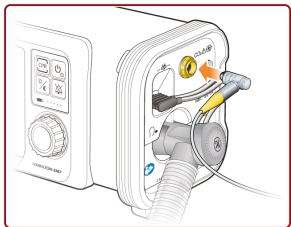

Tout est connecté

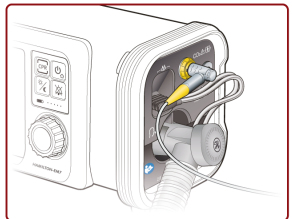


Raccordement de l'oxygène


Assurez-vous qu'une source d'oxygène est raccordée.

Saisie des informations du patient

1. Mettez le ventilateur sous tension.
2. Appuyez sur le type de patient souhaité.

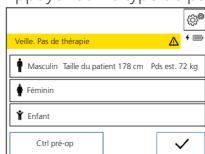

3. Si nécessaire, modifiez la taille du patient.
Le Pds est. est calculé automatiquement.

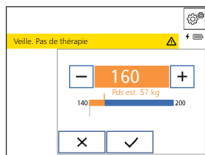

4. Appuyez sur ✓.

Calibration du capteur de CO2


La calibration s'effectue avec le capteur de CO2 et l'adaptateur raccordés l'un à l'autre, le tout *déconnecté du circuit respiratoire*.

1. Connectez le capteur de CO2 au port CO2 du ventilateur.
2. Patientez pendant le préchauffage du capteur (2 min).
3. Fixez l'adaptateur au capteur de CO2.
4. Appuyez sur > Général.
5. Vérifiez que le capteur de CO2 est réglé sur MAR.
6. Appuyez sur Calibration capteur CO2.


La calibration du capteur commence.
Un message s'affiche à la fin, indiquant le succès ou l'échec.

Exécution de la vérification préopérationnelle


1. Appuyez sur **Ctrl pré-op** dans la fenêtre des Réglages patient.
2. Appuyez sur ✓ pour commencer les vérifications.

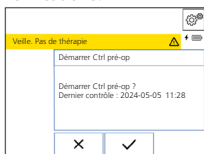

Vous serez guidé tout au long des vérifications.

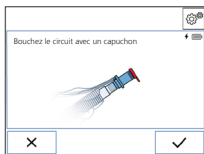

3. À l'invite, retirez le capuchon.

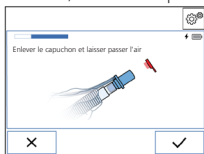

4. Une fois l'opération terminée, appuyez sur ✓ pour quitter.

