


Carte de référence rapide du HAMILTON-HF90

Remplacement de la batterie

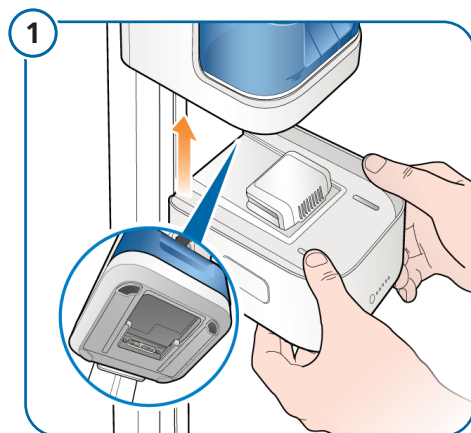


PRÉCAUTION


La batterie est lourde. Manipuler avec précaution.

Insérez la batterie sous l'appareil, légèrement à l'avant.

Insérez les connecteurs électriques de la batterie dans le puits situé sous l'appareil.

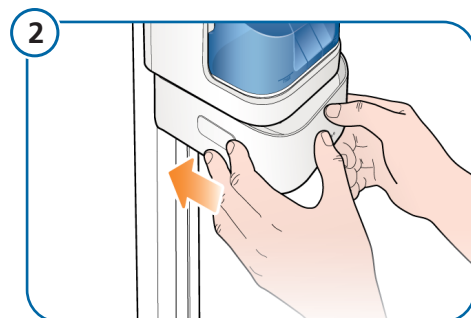


Faites glisser la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.

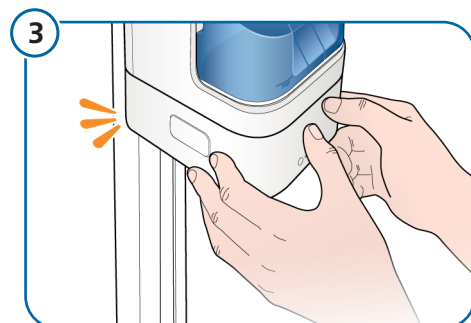


Un clic audible indique que la batterie est verrouillée à son emplacement.

Retrait de la batterie

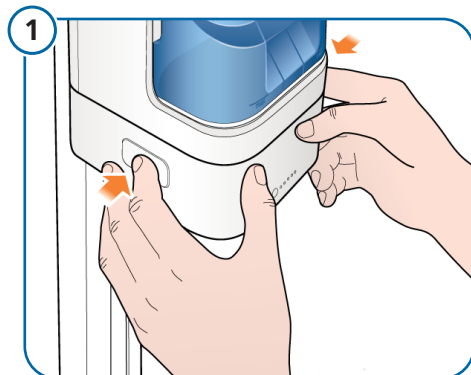


Pour déverrouiller la batterie, appuyez sur les boutons situés de chaque côté, puis commencez à la faire glisser vers l'avant.

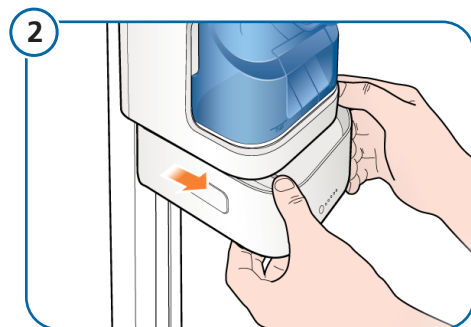

Faites-la glisser doucement vers l'avant.

Le compartiment électrique de la batterie l'empêche de glisser complètement hors de l'appareil.

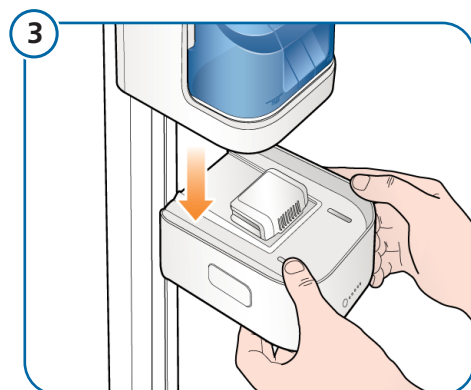

PRÉCAUTION

La batterie est lourde. Manipuler avec précaution.

À cette position, baissez la batterie et sortez-la de dessous l'appareil.