

Guida rapida IntelliCuff®

Tasto Tacitazione allarme

- 1 Premere (se appropriato per l'allarme)
 - ▶ Tacitazione allarme per 2 min

Tasto di accensione

- 1 ON: Premere a lungo > 3 sec
 - ▶ Avvio auto-test
 - ▶ I numeri lampeggiano: test riuscito
 - ▶ Dopo 3 sec i valori smettono di lampeggiare
- 2 OFF: Premere a lungo > 3 sec (possibile solo se il tubo non è collegato)

Tasto Blocco

- 1 Blocco del tastierino: Premere per 2 sec
 - ▶ Tacitazione allarme non viene mai bloccato
- 2 Sblocco del tastierino: Premere per 2 sec

Regolazione pressione target

- 1 Premere (+) o (-)
 - ▶ La pressione target lampeggia
- 2 Modificare la pressione con (+) o (-)
 - ▶ Dopo 3 sec viene applicata la nuova impostazione

Tasto Deflate (Sgonfiare)

- 1 Premere a lungo > 3 sec per sgonfiare la cuffia
 - ▶ Il dispositivo emette un beep
 - ▶ Il dispositivo applica una pressione negativa
 - ▶ La pressione raggiunge il valore 0, il dispositivo emette un beep
- 2 Estubare il paziente
- 3 Spegner il dispositivo entro 1 min

Tasto Hold (Pausa)

- 1 Premere a lungo (3 sec) per attivare la pausa per un periodo di tempo limitato
 - ▶ Il dispositivo emette un beep
 - ▶ La pressione target lampeggia per 3 sec
 - 2 Modificare la pressione con (+) o (-)
 - ▶ Dopo 3 sec viene applicata la nuova impostazione
- Per **INTERROMPERE** la **pausa**, premere di nuovo il tasto Hold (Pausa)



Presentazione del dispositivo

Tipi di allarme

- Rosso, lampeggiante ▶ Alta priorità
- ▶ Guasto tecnico
- Giallo, lampeggiante ▶ Media priorità



Tacitazione allarme



Perdite del sistema cuffia



Sgonfiaggio in corso



Cuffia sgonfia > 1 min



Pausa per un periodo di tempo limitato attiva




Guasto tecnico




Display degli allarmi e dell'alimentazione

- 1 Tasto Tacitazione allarme
- 2 Lampada di allarme
- 3 Icone di allarme
- 4 Tasto Accensione/Spegnimento
- 5 Icone di alimentazione

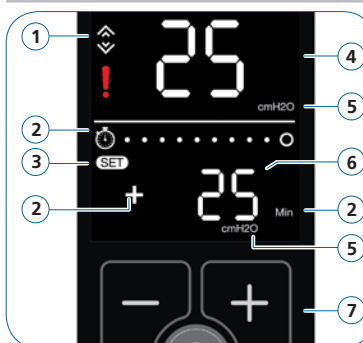

Display e comandi relativi alla pressione

- 1 Indicatore della tendenza della pressione (aumento/diminuzione)
- 2 Icone relative alla pausa per un periodo di tempo limitato (vedere a pagina 9)
- 3 Visualizzata quando è possibile regolare la pressione target
- 4 Pressione attuale
- 5 Unità di misura
- 6 Pressione target (imposta)
- 7 Tasti di regolazione (+/-)

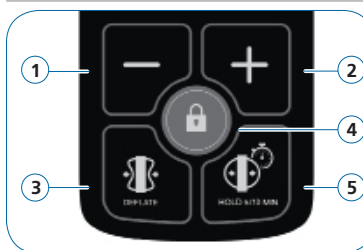

Pannello di comando

- 1 Diminuisci (-) pressione target
- 2 Aumenta (+) pressione target
- 3 Sgonfia cuffia
- 4 Blocca/sblocca pannello di comando
- 5 Esegui pausa per un periodo di tempo limitato

Per informazioni dettagliate, consultare le *Istruzioni per l'uso di IntelliCuff*.