

Início rápido HAMILTON-EM7


Diretrizes para a inicialização do HAMILTON-EM7

Lista de verificação diária


- Verifique o respirador quanto a danos visíveis
- Verifique o kit de respiração quanto a danos visíveis
- Verifique se todos os acessórios e consumíveis estão disponíveis e prontos para uso
- Verifique o nível de carga da bateria e certifique que está totalmente carregada

Conexão do kit de respiração


1. Conecte a válvula expiratória à porta
Para o paciente.

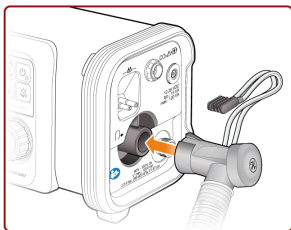


2. Conecte o plugue de pressão do sensor de fluxo à porta de conexão do plugue de pressão do sensor de fluxo. Certifique-se de que os tubos *não* estejam dobrados.

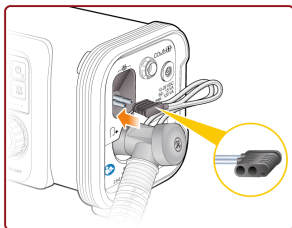

3. Conecte o sensor CO2, se necessário
(opção de CO2 necessária).

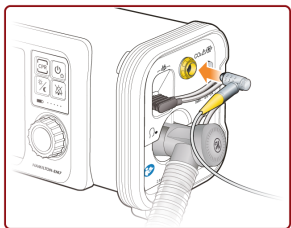

Todos conectados

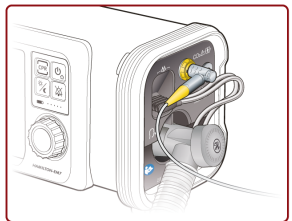


HAMILTON
MEDICAL

Conexão do oxigênio


Certifique-se de que uma fonte de oxigênio esteja conectada.

Especificação das informações do paciente

1. Ligue o respirador.
2. Toque no tipo de paciente pretendido.

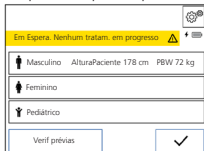

3. Se necessário, altere a altura do paciente.
O PBW é calculado automaticamente.

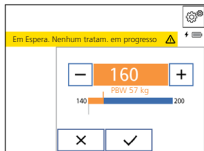

4. Toque em ✓.

Calibrar o sensor CO2

A calibração com o sensor CO2 e o adaptador de vias aéreas conectados um com o outro, *desconectados do circuito de respiração*.


1. Conecte o sensor CO2 à porta CO2 no respirador.
2. Aguarde até que o sensor aqueça (2 min).
3. Conecte o adaptador de vias aéreas ao sensor CO2.
4. Toque em  > Geral.
5. Certifique-se de que o sensor CO2 está na posição LIG.
6. Toque em Calibração sensor CO2.

A calibração do sensor inicia.


No final, é exibida uma mensagem indicando se a operação foi bem-sucedida ou falhou.

Execução da verificação prévia


1. Toque em **Verif prévias** na janela Configurações do paciente.
2. Toque ✓ para iniciar as verificações.

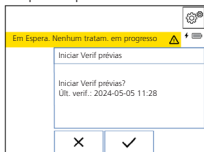

É orientado ao longo de todas as verificações.

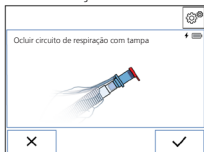

3. Quando solicitado, remova a tampa.

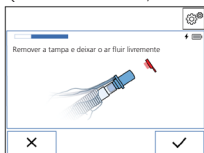

4. Quando concluído, toque em ✓ para sair.

