


Riferimento rapido per HAMILTON-HF90

Sostituzione della batteria

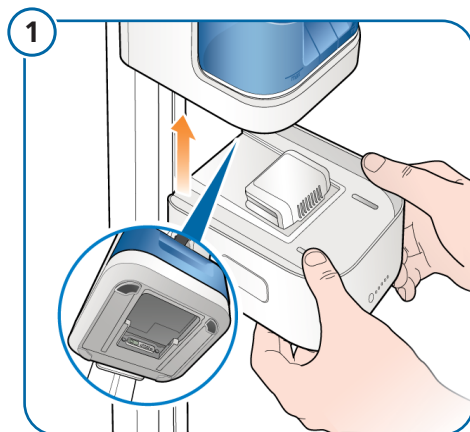


ATTENZIONE


La batteria è pesante. Maneggiare con cura.

Inserire la batteria sotto al dispositivo, leggermente verso il lato frontale.

Inserire il connettore elettrico della batteria nell'apposito incavo sotto al dispositivo.

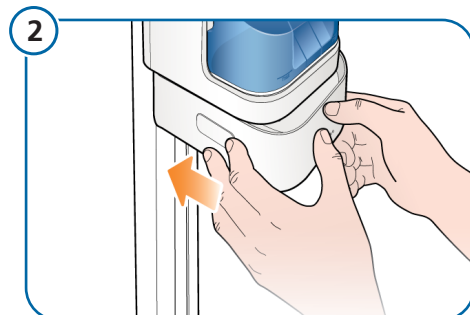


Far scorrere indietro la batteria fino a farla scattare in posizione.

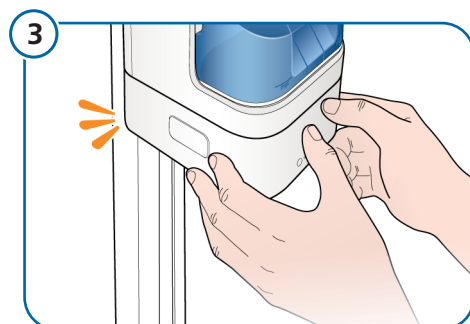


Un click udibile indica che la batteria è bloccata in posizione.

Rimozione della batteria

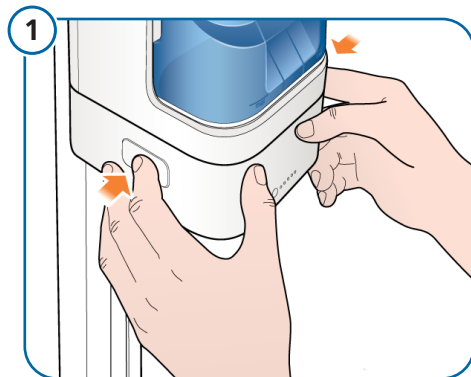


Premere i pulsanti ai lati della batteria per sbloccarla e iniziare a farla scorrere in avanti.

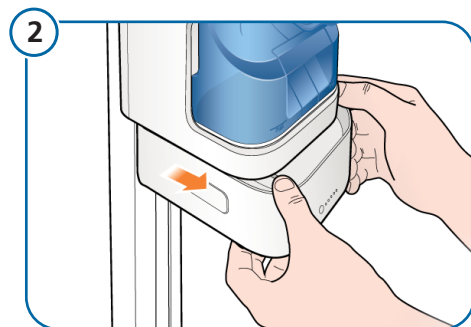

Far scorrere attentamente la batteria in avanti.

Il compartimento elettrico sulla batteria ne impedirà lo scorrimento completo al di fuori del dispositivo.

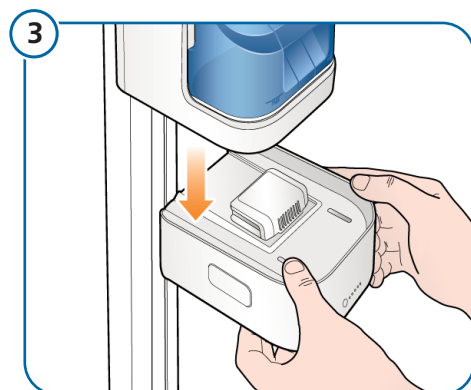

ATTENZIONE

La batteria è pesante. Maneggiare con cura.

Una volta in posizione, estrarre la batteria dal dispositivo portandola verso il basso.